

今回のテーマ 【 はく。歩く。その先へ 🧑🏻🧑🏻 】

今回は10月上旬に発売予定のあゆみの新商品「ライフステップ」のご紹介♪

歩くことをあきらめない靴 ライフステップ

足入れスムーズ



すべり台状の踵で履きやすい!

履きやすい



2枚形状のベロで巻き込みにくい!

調整できる



足の状態に合わせてベルトで微調節可能

【サイズ】 M(22.0~22.5)・L(23.0~23.5)・LL(24.0~24.5)・3L(25.0~25.5)・4L(26.0~26.5)・5L(27.0~27.5)
 【足囲】 3E
 【カラー】 グレー、ブラック
 【価格】 税込 5,840円

正しい靴の履き方



STEP 0 まずはサイズ選び


- 人は左右で足のサイズが異なります。必ず両足を測定しましょう。
- 「はくときに楽だから」と大きすぎるサイズはNG。歩くと不安定になり疲れやすくなります。

STEP 1 かかとを合わせましょう

つま先を上げ、かかとをトントンと合わせましょう。

STEP 2 そのまま甲ベルトをしっかり留めましょう

この一時間でかかたが固定され、ブレずに歩きやすくなります。

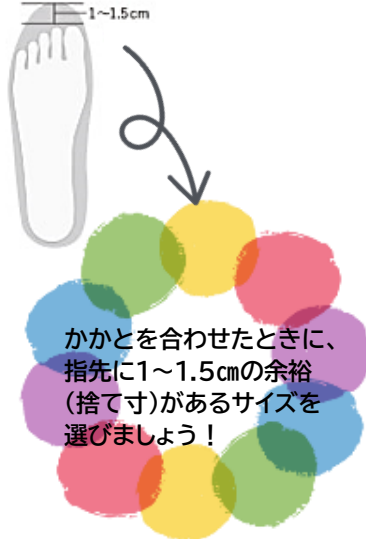

足元から人生を幸せに TOKUTAKE リハビリ&介護予防 元気ツム

住宅リフォーム・福祉用具以外・販売
株式会社ハピネス
 【指定事業所番号：1670202298】
 富山県高岡市野村 1355-9
 ☎️：(0766)54-6114
 FAX：(0766)54-6214

Instagram

「履きやすい靴から歩きやすい靴へ」「自宅内から外出へ」「介護靴からスニーカーへ」生活を次のステップへ進める靴として選んでいただきたいお靴です😊